

FisioVital

Recomendações de lavagem do TheraTogs.



Procedimento de lavagem recomendado:

Lavagem à máquina, com água quente (se tiver a função), delicado: Lavar em uma máquina de lavar roupa, nível da água= Alta, lavagem quente (se tiver a função) e ciclo gentil. Remova os Velcros. Lave separadamente de outros itens de roupa. A lavagem da máquina garante que quantidades abundantes de água removam sais, óleo e proteínas presas na espuma (FOAM – parte branca da roupa), liberando as bolhas de ar na estrutura da espuma. As bolhas de ar são liberadas por agitação, usando água morna (40c) e grandes quantidades de água. O uso de detergente ou sabão anulará a garantia do produto.



Alvejante (água sanitária 2,5%) ou Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada 3%) quando necessário (consulte o gráfico). Pré-lavagem com Peróxido de Hidrogênio (água oxigenada): despeje, ensopando áreas manchadas da espuma branca (FOAM) com a solução de peróxido de hidrogênio 3%, deixe agir de 10 a 15 minutos e remova com água abundante. Pré-lavagem com alvejante (água sanitária): 100ml de alvejante 2,5% derramada no lado da espuma branca (FOAM), remova após 10 a 15 minutos. Após a pré-lavagem lave na máquina e adicione 1 xícara (237 ml) de peróxido de hidrogênio 3%. O uso de detergente ou sabão anulará a garantia do produto.



Seque esticado na sombra ou na máquina de secar na função delicada/ar frio: o ciclo suave de centrifugação da máquina de lavar removerá a maior parte da água contida na espuma branca (FOAM), reduzindo a necessidade de torção de água do TheraTog. Deixe o TheraTog secar esticado, com a espuma branca (FOAM) voltada para cima. Não use pregador de roupas e evite a luz solar direta ou o calor direto no lado da espuma branca (FOAM).



O lado da espuma branca é frágil quando molhado. Tenha cuidado para não belisque, aperte, pregue o lado da espuma com as unhas, superfícies rugosas ou anéis quando molhados. Não esfregue o lado da espuma quando seco ou molhado. Não use lencinhos de limpeza de bebê ou qualquer outro lenço na espuma.



Se uma máquina de lavar roupa não estiver disponível: Lavagem à mão com água quente. Adicione 37 litros de água filtrada em uma bacia lisa. Coloque o TheraTog na água e aperte suavemente a espuma / tecido na água para liberar as bolhas de ar. A espuma já não parecerá "branca". Agite a água com as mãos para soltar a sujeira por 10 a 15 minutos. Jogue esta primeira água fora e encha com água fresca. Na segunda lavagem de água fresca, adicione peróxido de hidrogênio 3% à lavagem. Use um movimento de agitação. Coloque o TheraTog molhado sobre uma toalha, enrole a toalha e aperte (sem torção). Deixar secar esticado e na sombra.



FisioVital

Como prevenir danos no FOAM lado branco do Theratogs.



Nunca deixe seu TheraTogs guardado no carro, especialmente no Brasil que é muito quente.

Nunca guarde ou deixe seu TheraTogs próximo a objetos quentes, tais como radiadores, aquecedores etc..



Nunca dobre o TheraTogs sujo ou húmido deixando Foam (lado branco) em contato com o Foam (lado branco) – coloque uma toalha no meio.

Quando for secar o TheraTogs coloque o FOAM para cima, e evite a sobreposição do FOAM.

Quando for pendurar não usar pregador.



Guarde seu TheraTogs limpo, pendurado, sem pregador, com o FOAM virado para fora, não sobreponha o FOAM.


Proteja seu Foam de itens pontudos ou afiados.



Se for dobrar seu TheraTogs, coloque papel BRANCO entre o FOAM para protegê-lo.

Minimize a quantidade de dobraduras ao guardar seu TheraTogs.

Tenha certeza que seu TheraTogs esta limpo antes de guardar.

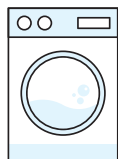

Para desinfetar seu TheraTogs use peróxido de hidrogênio (água oxigenada) nas proporções vistas no documento – vide folha.

Para uma melhor lavagem prefira lavar seu TheraTogs na máquina de lavar, ao invés de na mão.